
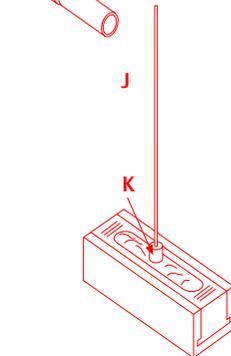
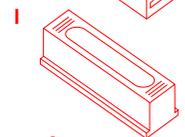



Für den Techniker

For the technician

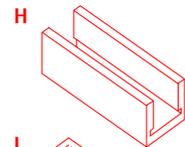

- H** Fixierschiene Artikulator
- I** Fixierwanne
- J** Techniker-Senkrechte
- K** Hülse rot

- H** Fixation track for articulator
- I** Fixation cup
- J** Technician's vertical indicator
- K** Red sleeve

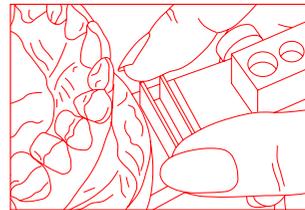


Übertragen der Senkrechten in den Artikulator

Transfer the vertical indicator to the articulator


Kleben Sie die Fixierschiene **H** mit Sekundenkleber zwischen Stützstift und Montageplatte quer fest. Schieben Sie die Fixierwanne **I** bis zum mittleren Anschlag in die Fixierschiene des Artikulators **H**.

*Glue with superglue the fixation track **H** horizontally between the guide pin and the mounting plate. Move the fixation cup **I** to the first notch in the fixation track of the articulator **H**.*

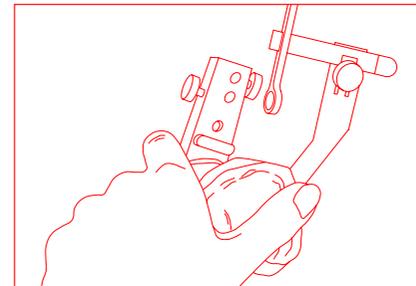


Halten Sie die Bißgabel **A** mit der Hand auf dem Modell.

*Hold the bitefork **A** with one hand on the model.*

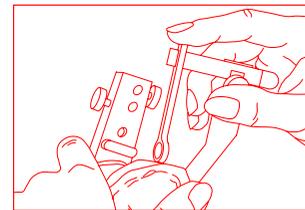


Schieben Sie den Magnetschieber **D** so nah wie möglich ans Modell. Stecken Sie die rote Hülse **K** auf die Techniker-Senkrechte **J** und legen diese auf den Magneten **G**.

*Move the magnet mover **D** as close as possible towards the model. Push the red sleeve **K** on the technician's vertical indicator **J** and place it on the magnet **G**.*

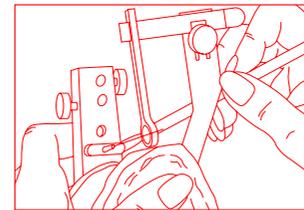

Senken Sie diese in die Fixierwanne **I** und befestigen sie mit Kunststoff.

*Lower this into the fixation cup **I** and apply pattern resin.*

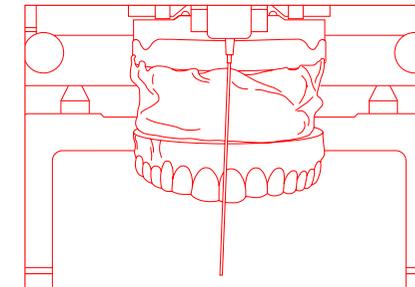

Fixierter Lindefinder

Fixed line angle indicator

Das Resultat: Die Längsachse übertragen Sie in den Artikulator.

The result: The line angle is transferred to the articulator.

Jan Langner

linefinder

made in Germany

Jan Langner GmbH
Dental Labor

Birkachstraße 17/ 1
73529 Schwäbisch Gmünd
Telefon 071 71 94 73 50
Telefax 071 71 4 17 86
info@janlangner.de
www.janlangner.de